

BARRA DE SUJECIÓN INSTANTÁNEA PARA BAÑOS.

Fácil de instalar en cualquier lugar y donde haga falta un punto de apoyo adicional. Para uso temporal.

PRECAUCIONES:

- No instalar sobre superficies porosas y/o débiles.
- No instalar para soportar pesos de forma prolongada.
- Compruebe el agarre del asa antes de cada uso por si ha perdido adherencia desde la última utilización.

Si tienen dudas proceder nuevamente a su colocación.



INSTALACIÓN:

1. Limpiar la superficie donde debe montarse. Asegúrese que la superficie es plana, no porosa y exenta de agua o jabón.

2. Verificar que las ventosas estén limpias y secas. De limpiarlas, hacerlo con agua y jabón neutro.

3. Asegúrese que las ventosas no se posicionen sobre ranuras (separación entre azulejos).

4. Con las palancas en posición vertical (levantadas), posicionar y presionar la barra sobre la superficies elegida. Ello expulsará el aire de las ventosas.

5. Presione las palancas hacia abajo para el total vacío de las ventosas asegurándose la fijación.

Acabado el proceso y para más seguridad, verificar la sujeción tirando firmemente de la misma.

6. Para extraer o mover la barra de sujeción, levantar nuevamente las palancas y tirar de las pestañas a la vista localizadas en cada ventosa.




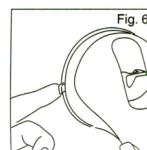


Fig. 6

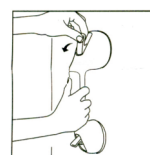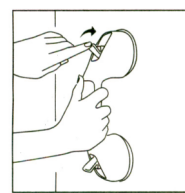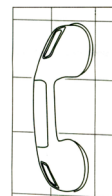