

ESPECIFICACIONES

EQUIPADO CON UN SENSOR DE MEDICIÓN DE ALTA PRECISIÓN.
MÁXIMA CARGA 180KG.

MÍNIMA DIVISIÓN 100 GR

MEDICION EN KG, LB y ST (seleccionable)

PANTALLA LCD

ENCENDIDO POR LEVE CONTACTO EN LA SUPERFICIE

PUESTA A CERO AUTOMÁTICA

INDICADOR DE SOBRECARGA


INDICADOR BATERÍA BAJA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Pilas LR-03 1.5V (2 unidades incluidas).


INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Asegurase de colocar la báscula sobre una superficie nivelada, plana y dura, evitando alfombras y otro tipo de superficies blandas.
- 2- Encender la báscula ejerciendo un ligero toque con el pie. Esperar unos segundos hasta que sea visible la siguiente figura en la pantalla:

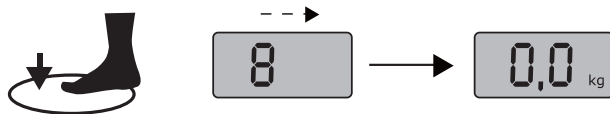

NOTA: la báscula no funcionará adecuadamente si se sube a la misma antes que la pantalla muestre las figuras **8** o **0,0**. Si ésto ocurriese, por favor, vuelva a repetir el paso número 2.

- 3- Suba a la báscula y espere unos segundos para que efectue la medición. El peso correcto aparecerá del siguiente modo:

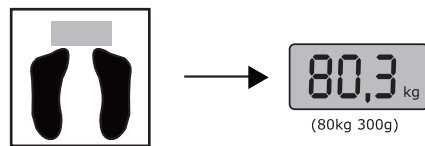

APAGADO AUTOMÁTICO

En el momento en que la báscula no perciba ningún peso, se apagará automáticamente transcurridos 6 segundos aprox.

INDICADOR DE SOBRECARGA

Cuando la báscula perciba una carga superior a 180Kg, la siglas "ERR" aparecerán en la pantalla:



INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Cuando las pilas necesiten ser remplazadas, las siglas "Lo" aparecerán en la pantalla:



Para su reemplazo, abra el compartimento de la pila situado detrás de la báscula. Extraiga la batería con un instrumento adecuado. No fuerce los contactos, ya que correrían el riesgo de romperse. Asegúrese de desechar la batería adecuadamente.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS

- Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana, lo que permitirá una lectura más precisa.
- Efectúe la medición siempre con la misma báscula colocada en el mismo sitio. En ocasiones, el tipo de superficie puede afectar a la medición.
- Puede haber una oscilación de 100gr entre dos mediciones muy seguidas.
- Limpie la báscula con un paño húmedo y no deje que el agua se filtre dentro del mecanismo de la báscula, ya que podría dañar su electrónica.
- No use productos agresivos para su limpieza.
- Extraiga las baterías si no se tiene previsto su uso, en un tiempo prolongado.


• **ATENCIÓN: SUPERFICIE RESBALADIZA CUANDO ESTÁ MOJADA.**



DäHer Instrucciones de uso

Báscula de baño DIGITAL

Mod.93.001
Mod.93.001/N

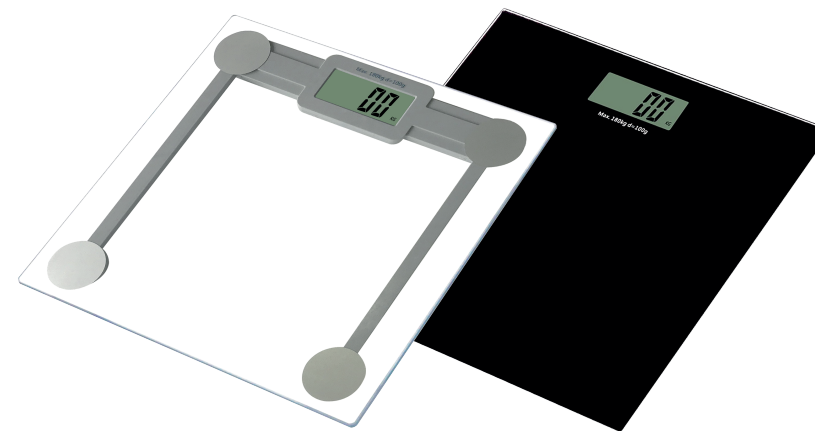

Distribuido por:
ELECTRO DH S.A. Fortuna, 29.
08902 L'Hospitalet de Ll. (Barcelona)

HECHO EN CHINA